


# MANUEL UTILISATEUR

Modèle: OUESSANT

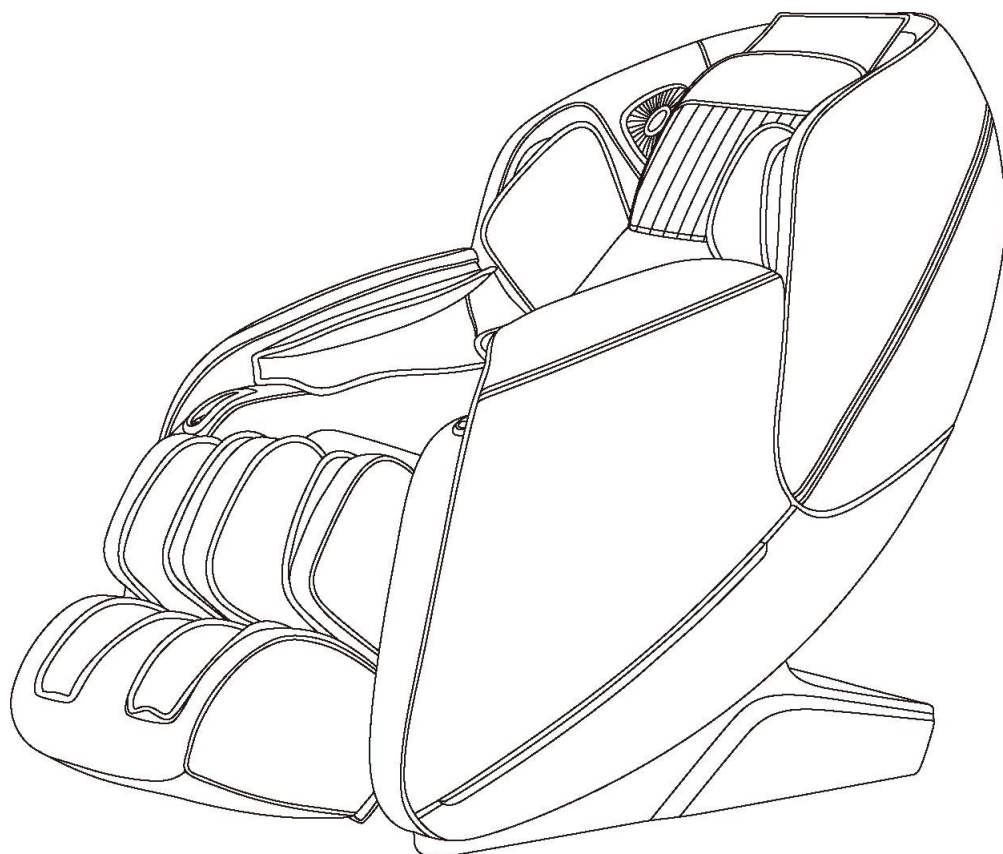

# Distegn

[contact@distegn.fr](mailto:contact@distegn.fr)

**Distegn**

Merci d'avoir choisi notre fauteuil de massage OUESSANT !

Veuillez lire attentivement le guide ci-dessous, en portant une attention particulière aux consignes de sécurité. N'oubliez pas de conserver ces instructions.

## Sommaires

---

|                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sécurité et entretien</b> .....                                            | 3                           |
| Avertissements .....                                                          | 3                           |
| Utilisation Environnementale .....                                            | 3                           |
| Restrictions d'Utilisation.....                                               | 3                           |
| Précaution de Sécurité .....                                                  | 4                           |
| Entretien .....                                                               | 4                           |
| Interventions en Cas de Problèmes .....                                       | 4                           |
| <b>Attentions Particulières</b> .....                                         | 5                           |
| <b>Noms et fonctions des pièces</b> .....                                     | 8                           |
| <b>Fonctionnalités</b> .....                                                  | Erreur ! Signet non défini. |
| <b>Utilisation de l'appareil</b> .....                                        | 10                          |
| Connectez le fauteuil .....                                                   | 11                          |
| Fonctionnement des commandes de massage : .....                               | 11                          |
| Mise en veille (Standby) .....                                                | 11                          |
| Commencez le massage .....                                                    | 11                          |
| Ajustement de l'angle en position allongée .....                              | 11                          |
| Ajustement de la position des épaules.....                                    | 11                          |
| Bouton de pause .....                                                         | 12                          |
| Menu Fonction Manuelle .....                                                  | 15                          |
| • Arrêter le massage .....                                                    | 20                          |
| • Système de lecteur de musique Bluetooth .....                               | 20                          |
| • Démontage et utilisation des coussins de tête et du coussin de dossier..... | 20                          |
| • Distance par rapport au mur .....                                           | 22                          |
| <b>Caractéristiques</b> .....                                                 | 22                          |
| <b>Garantie</b> .....                                                         | 22                          |

### Avertissements



Veillez utiliser le fauteuil conformément aux instructions fournies. Toutes les utilisations autres que celles spécifiées dans le manuel sont strictement interdites et peuvent présenter des risques. Il est impératif d'empêcher les enfants d'avoir accès aux pièces mobiles du fauteuil, afin d'éviter tout danger potentiel.

Lors de la connexion du fauteuil à une source électrique, assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre pour garantir une utilisation sûre. En cas de malaise ou de sensation inhabituelle, éteignez immédiatement le fauteuil et débranchez-le. Il est également recommandé de ne pas porter de bijoux pendant l'utilisation du fauteuil de massage.

Si le fauteuil ne fonctionne pas normalement, éteignez-le et débranchez-le, puis contactez votre fournisseur pour obtenir de l'assistance. Le démontage du fauteuil ne doit être effectué que par un spécialiste qualifié.

Pour protéger les surfaces de l'appareil, il est recommandé de placer une serviette sous la tête si vos cheveux ou votre cuir chevelu sont traités ou mouillés avant de vous asseoir dans le fauteuil. De plus, il est déconseillé d'utiliser le fauteuil de massage pour les personnes de moins de 14 ans.

Pour les utilisateurs pesant plus de 130 kg, la garantie de non-défaillance du fauteuil ne peut être assurée. Assurez-vous que la prise à laquelle vous connectez l'appareil n'est pas desserrée, et éteignez toujours le fauteuil après utilisation avant de le nettoyer.

Il est recommandé de limiter chaque programme de massage à 20 minutes, avec un cumul maximal de 45 minutes par jour. De plus, veuillez éviter d'utiliser le fauteuil de massage sur des zones corporelles traumatisées, telles que des cicatrices récentes ou des plaies infectées.

L'utilisation du fauteuil en état d'ébriété ou en cas de malaise est fortement déconseillée. Attendez au moins une heure après avoir mangé avant d'utiliser le fauteuil de massage, et n'ajustez pas le massage à une intensité trop élevée en permanence pour éviter tout risque de blessure. Enfin, ne déposez aucun objet inflammable ou explosif dans l'appareil, et ne vous endormez pas pendant son utilisation.

### Utilisation Environnementale

- Évitez d'utiliser le fauteuil de massage dans des pièces à haute température ou excessivement humides, comme les salles de bains.
- Évitez les environnements sujets à des fluctuations soudaines de température.
- Évitez les endroits excessivement poussiéreux.
- Assurez-vous que la pièce d'utilisation est suffisamment ventilée.

### Restrictions d'Utilisation

- Personnes atteintes d'ostéoporose.
- Personnes souffrant de maladies cardiaques ou portant des dispositifs médicaux électroniques (par exemple, stimulateur cardiaque).
- Patients présentant de la fièvre.
- Femmes enceintes.
- Enfants de moins de 14 ans.
- Personnes physiquement, mentalement ou sensoriellement limitées.
  - Individus au corps mouillé.
  - Personnes insensibles à la chaleur.
  - Personnes atteintes de tumeurs malignes.

## Précaution de Sécurité

- Vérifiez la tension d'alimentation pour qu'elle corresponde aux spécifications de l'appareil.
- Ne débranchez pas la ligne électrique avec les mains mouillées.
- Évitez toute infiltration d'eau dans l'appareil pour prévenir les chocs électriques et les dommages.
- Ne manipulez pas les fils électriques ni ne modifiez les circuits.
- N'utilisez pas de lingettes humides sur les parties électriques.
- Éloignez-vous de l'appareil en cas de panne de courant pour éviter tout accident en cas de retour soudain du courant.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez le distributeur.
- En cas de malaise, arrêtez l'appareil et consultez un médecin.
- En cas de dommage à la ligne d'alimentation, remplacez-la rapidement avec l'aide d'un professionnel qualifié.

## Entretien

- La maintenance de l'appareil ne doit être effectuée que par un spécialiste qualifié ; il est interdit à l'utilisateur de démonter le fauteuil.
- Coupez toujours l'alimentation du fauteuil après utilisation.
- En cas de non-utilisation prolongée, enrroulez le cordon et rangez le fauteuil dans un endroit sec et sans poussière.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou de la lune pendant de longues périodes.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ; n'utilisez pas de diluants, d'essence ou d'alcool.
- Les composants mécaniques ne nécessitent pas d'entretien particulier.
- Utilisez l'appareil par intermittence, ne pas le faire fonctionner pendant une période prolongée.


## Interventions en Cas de Problèmes

- Le son du moteur pendant l'utilisation est considéré comme normal.
- En cas de dysfonctionnement de la télécommande, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté et que l'interrupteur d'alimentation est allumé.
- Le fauteuil s'éteindra automatiquement lorsque la durée définie pour un programme de massage sera écoulée.
- Si le fauteuil fonctionne en continu pendant une durée excessive, le dispositif de détection de température l'éteindra automatiquement ; dans ce cas, attendez une demi-heure avant de réutiliser l'appareil.


## Attentions Particulières




↓  
Ne pas appuyer

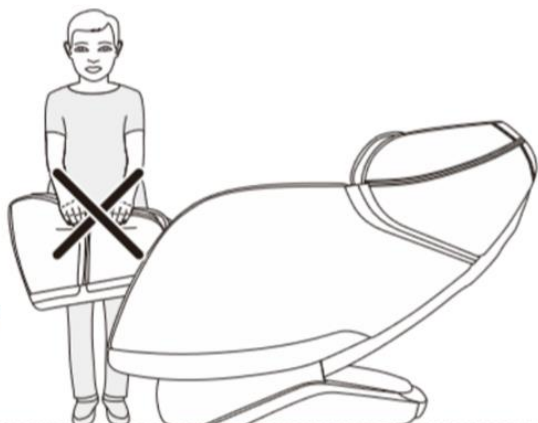


Ne surchargez pas le repose-pieds en position relevé pour éviter les blessures corporelles et endommager l'appareil.

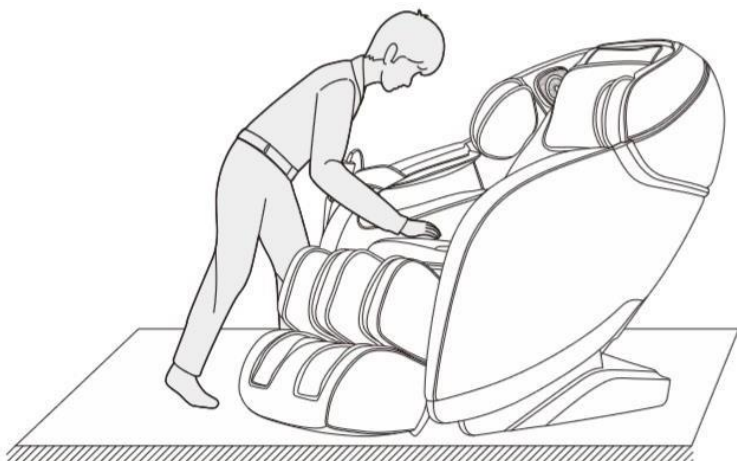


Avant de vous asseoir dans le fauteuil de massage, assurez-vous que les mains de massage soient situées derrière les coussins du dossier pour éviter l'inconfort de massage.

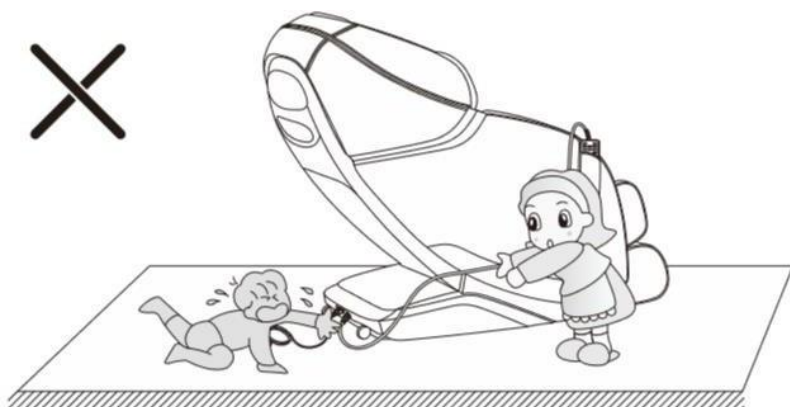


Dégagez la ligne d'alimentation pour éviter les chocs électriques ou la défaillance du fauteuil de massage pendant le massage. Après utilisation, débranchez le contrôleur et le cordon d'alimentation et rangez-les soigneusement.

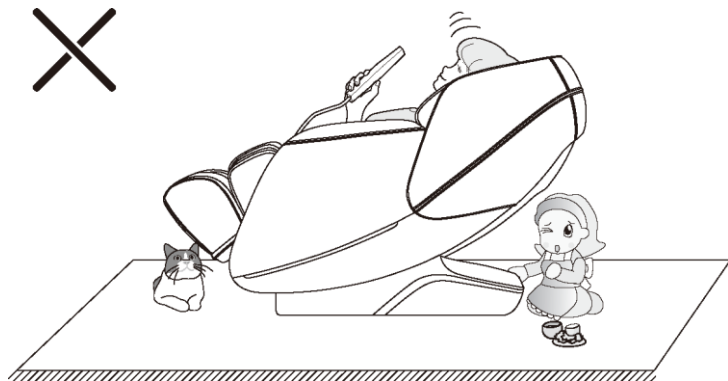


Avant de débiter une séance de massage, assurez-vous qu'il n'y ai aucun individu ou objet autour du repose-pieds ou derrière le dossier. En position Zéro Gravité, le fauteuil se penche en arrière et s'abaisse, ce qui peut causer des blessures corporelles à toute personne qui pourrait se situer aux endroits susmentionnés.

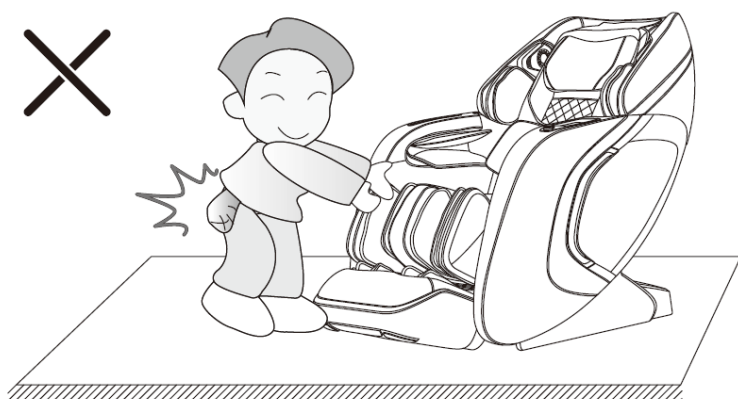


Avant d'utiliser le fauteuil de massage, veuillez retirer tous les objets durs de vos poches, tels que clés, montres, ou tout autre objet dur que vous pourriez porter, afin d'éviter tout dommage potentiel à l'appareil et de prévenir tout risque de blessure physique pendant la séance de massage.

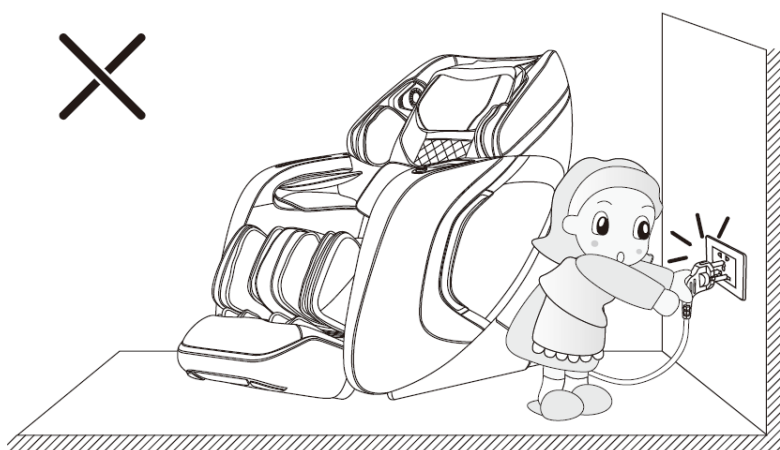

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas directement l'interrupteur situé à l'arrière du fauteuil de massage pendant son fonctionnement, afin d'éviter tout dommage au produit ou toute blessure physique.



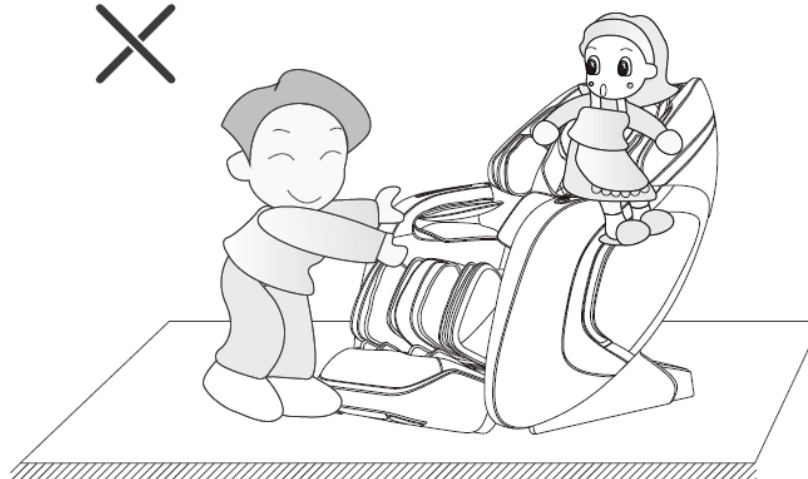


Le fauteuil de massage ne doit pas être utilisé par plus de deux personnes en même temps, afin d'éviter toute défaillance du produit ou blessure corporelle. De plus, il est interdit de laisser des enfants jouer sur le fauteuil ou grimper sur les repose-jambes, l'assise, le repose-pieds, le dossier ou les accoudoirs, sous peine de provoquer des accidents ou des blessures.

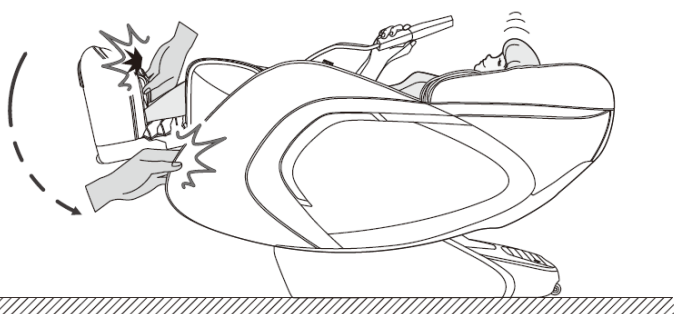

Lors du réglage de la fonction télescopique du repose-pieds ou lors de son inclinaison, veuillez à ne pas placer d'objets durs (comme des clés, un téléphone portable, etc.) ni à introduire vos mains dans les interstices du repose-pieds ou à l'intersection avec l'accoudoir, afin d'éviter tout dommage au produit ou toute blessure pendant le fonctionnement.

## Noms et fonctions des pièces

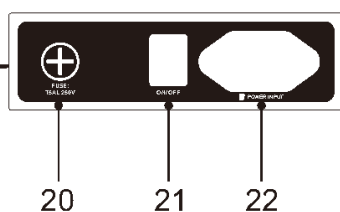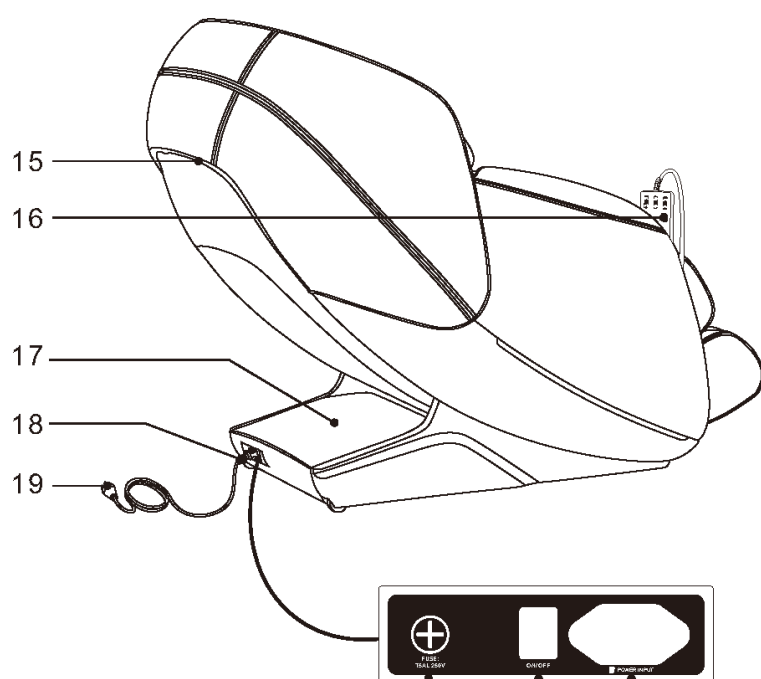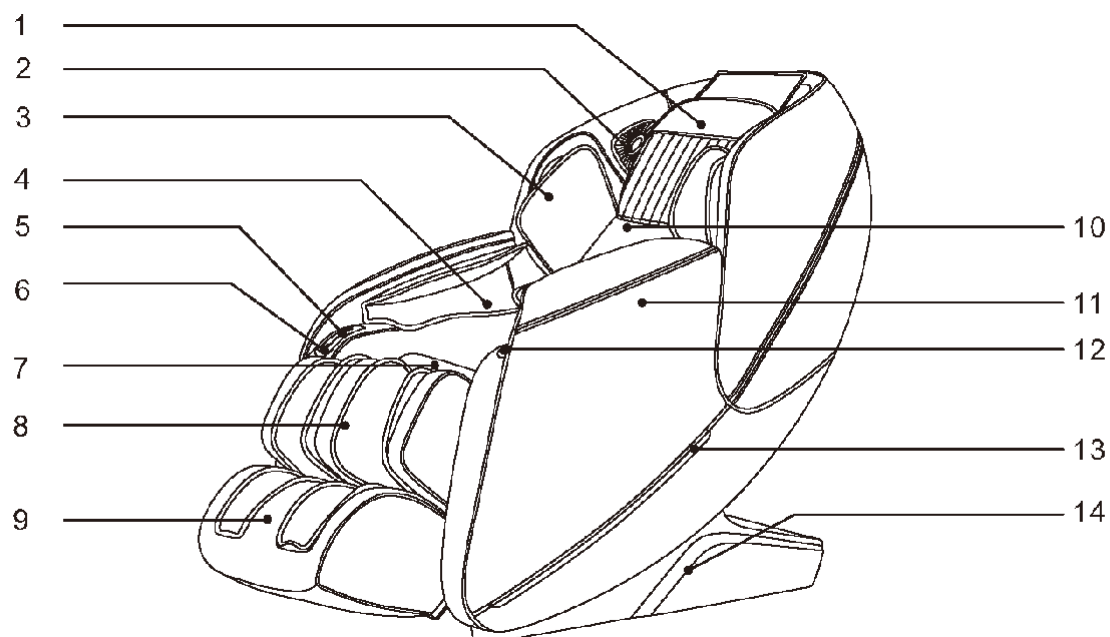

1. Coussin pour la tête
2. Haut-parleurs numériques 3D +microphone pour la commande vocale
3. Coussins d'air pour les épaules
4. Coussins d'air pour les bras
5. Contrôle manuel / Etui de support de téléphone portable
6. Chargement USB
7. Coussin d'assise
8. Coussins d'air pour les mollets
9. Repose-pieds, réglage manuel
10. Dossier
11. Accoudoir / revêtement latéral
12. Raccourcis clavier de l'accoudoir
13. Eclairage LED d'ambiance
14. Panneau latéral
15. Cache du boîtier moteur
16. Télécommande filaire LCD
17. Couvercle de l'unité de commande
18. Rouleaux pour transport
19. Ligne électrique d'alimentation
20. Fusible/Armoire de sécurité
21. Interrupteur d'alimentation
22. Prise de câble d'alimentation

06

## Fonctionnalités

### Massage par airbags

Le fauteuil de massage propose une technologie avancée de massage par pression d'air, répartie sur l'ensemble du corps. Il intègre 24 airbags, au niveau des paumes et des avant-bras, des bras supérieurs, la taille, les jambes ainsi que les pieds. Chaque zone bénéficie d'un réglage d'intensité sur trois niveaux, afin d'adapter la pression à vos préférences. À noter que les coussins d'air situés au niveau des paumes sont dotés de saillies avec fonction de magnétothérapie, visant à stimuler les points d'acupression.

### Chauffage et apesanteur

Le fauteuil est équipé d'un système de chauffage intégré dans le dossier, basé sur la technologie au graphène. Cette source de chaleur douce permet de détendre les muscles profonds et d'amplifier les bienfaits du massage.

La fonction "zéro gravité" est activable d'un simple bouton. Elle permet de répartir le poids du corps de manière uniforme, réduisant la pression sur les articulations et procurant une sensation d'apesanteur. Grâce à la technologie de glissière intelligente, le fauteuil peut s'incliner tout en restant proche du mur, économisant ainsi un maximum d'espace.

### Massage des jambes et des pieds

Ce fauteuil propose une fonction d'étirement des jambes avec élévation et inclinaison automatiques du repose-jambes et du dossier. Des cycles d'allongement sont prévus, pendant lesquels les coussins d'air des jambes et les mécanismes de massage du dos fonctionnent en synergie.

Le repose-jambes intègre également un massage par pétrissage, pour soulager la fatigue musculaire due à une station debout prolongée. Une fonction de massage par pression d'air ciblée sur les mollets aide à détendre les muscles, à stimuler la circulation sanguine, à soulager les tensions, et à réduire les gonflements locaux.

Pour les pieds, des jeux de roulement effectuent un massage ciblé à la base des orteils et sous la voûte plantaire. Trois niveaux d'intensités sont disponibles selon vos besoins.

Le fauteuil ne détecte pas automatiquement la longueur des jambes lorsque le repose-jambes est positionné pousser au maximum sur vos jambes pour allongé le repose-pieds en fonction de votre morphologie.

### Ajustements et confort personnalisés

L'utilisateur peut ajuster de façon indépendante ou synchronisée l'inclinaison du dossier et du repose-jambes. Le fauteuil offre également une fonction de retour automatique en position assise ainsi qu'un système de réinitialisation automatique du mécanisme de massage à la fin de chaque session.

Pour renforcer l'ambiance détente, des lumières LED d'atmosphère sont intégrées dans les deux accoudoirs.

### Commandes et contrôle vocal

L'accoudoir gauche du fauteuil est équipé de nombreuses commandes pratiques :

- Un bouton pause/interruption,
- Un bouton de commande vocale,
- Un bouton pour régler l'inclinaison du fauteuil,
- Un bouton pour lancer un programme automatique,


Grâce à la reconnaissance vocale intégrée, il est possible de piloter les principales fonctions du fauteuil par la voix (anglais). L'ensemble est complété par une télécommande moderne dotée d'un écran LCD, pour une navigation simple et intuitive.

### Ambiance sonore et Bluetooth

Pour parfaire l'expérience de relaxation, le fauteuil dispose d'un système audio intégré avec son numérique 3D. Le fauteuil dispose également du système Bluetooth: utilisez votre smartphone pour vous connecter au

fauteuil de massage et écouter votre propre musique.

## Utilisation de l'appareil

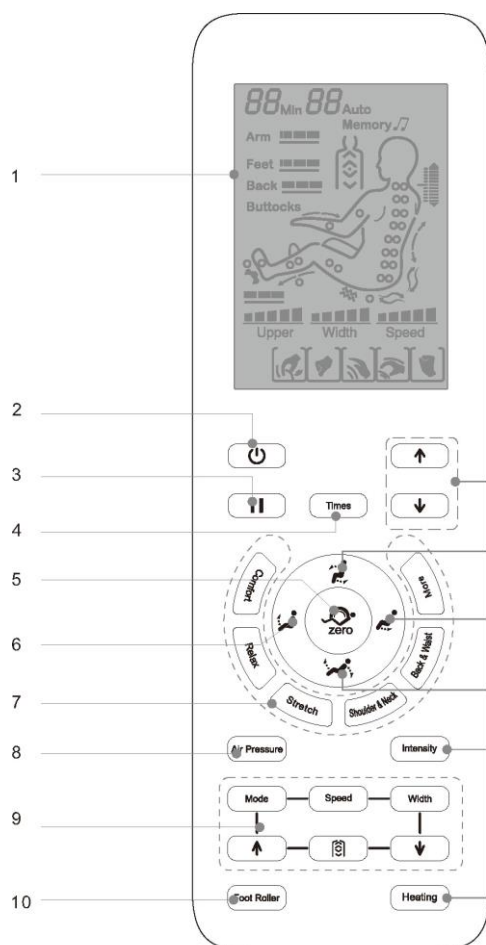

**1. Écran d'affichage:** l'écran LCD affiche en temps réel les fonctions de massage en cours d'utilisation.

**2. Interrupteur:** Permet d'allumer ou d'éteindre le massage.

**3. Touche Pause :** Interrompt toutes les fonctions de massage en cours. Une nouvelle pression relance les fonctions là où elles ont été arrêtées.

**4. Ajustement du temps:** Permet de sélectionner une durée de massage.

**5. Inclinaison automatique :** Permet une inclinaison automatique en position de zéro gravité (3 positions possibles)

**6. Touche de montée du repose-jambes :** Permet de relever le repose-jambes selon vos besoins de offrir une position de massage plus confortable.

**7. Massages automatiques :** Permet de sélectionner le programmes de massage souhaité.

**8. Ajustement de la pression d'air:** Permet de sélectionner l'intensité de la pression d'air (bras et jambes)

**9. Fonction manuel :** Permet de paramétrer le massage manuel.

**10. Ajustement du massage de la voute plantaire:** Permet de sélectionner l'intensité du massage de la voute plantaire.

**11. Ajustement la hauteur du massage :** Permet de régler le positionnement du point de massage.

**12. Touche position assise synchronisée :** Ajuste simultanément l'inclinaison du dossier et du repose-jambes pour adopter une posture de massage assise confortable.

**13. Touche de descente du repose-jambes :** Permet d'abaisser le repose-jambes selon vos besoins de massage.


**14. Touche position allongée synchronisée :** Ajuste simultanément le dossier et le repose-jambes pour adopter une posture allongée de massage optimale.

**15. Intensité de la pression d'air :** Permet le réglage de l'intensité de la pression d'air (airbags)

**16. Chauffage :** Permet d'activer ou de désactiver la fonction chauffage dans le dos.

## Connectez le fauteuil

Connectez le fauteuil à une prise, puis utilisez l'interrupteur d'alimentation pour l'allumer :

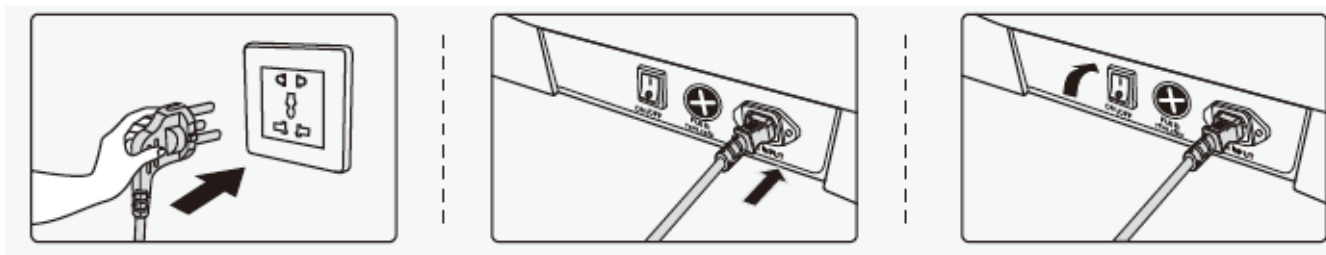

## Fonctionnement des commandes de massage :

### Mise en veille (Standby)

Lorsque le fauteuil de massage est sous tension mais éteint, la télécommande reste en mode veille : son écran est éteint et aucune opération n'est possible (à l'exception de l'interrupteur principal).

Cependant, même en mode veille, vous pouvez :

Utiliser les boutons de raccourci situés sur l'accoudoir pour ajuster l'inclinaison du dossier et du repose-jambes.

Activer la commande vocale en appuyant sur le bouton dédié afin de « réveiller » le fauteuil.

### Commencez le massage

Appuyez sur l'interrupteur pour démarrer le massage. L'écran de démarrage s'affiche. Le dossier reste en position par défaut et le repose-jambes se soulève légèrement. Il suffit alors de sélectionner l'un des programmes automatiques proposés dans l'interface de sélection des fonctions automatiques pour commencer le massage.

Si aucune fonction "AUTO" n'est sélectionnée dans un délai de 3 minutes, le fauteuil de massage s'éteindra automatiquement.

### Ajustement de l'angle en position allongée

Après avoir sélectionné une fonction automatique, les positions du dossier et du repose-jambes seront ajustées aux angles prédéfinis. Une fois l'angle ajusté, le fauteuil de massage effectuera automatiquement la détection de la position des épaules et de la forme du corps. Attendez la fin de cette détection (ou appuyez sur "OK" pour passer cette étape).


### Ajustement de la position des épaules

Après avoir détecté la position des épaules, un bip sera émis. Si la position détectée diffère de la position réelle des épaules, vous pouvez l'ajuster en appuyant sur les touches "HAUT" ou "BAS". La position des épaules peut être ajustée sur 11 niveaux. Si aucun ajustement de la position des épaules n'est effectué dans les 10 secondes, la fonction de massage démarrera automatiquement. Appuyez

directement sur "OK" pour démarrer le massage immédiatement. Si aucune position d'épaule ne peut être détectée, le massage débutera en fonction de la hauteur des épaules par défaut.

Note : Pendant le massage, vous pouvez accéder au menu "Réglage des épaules" en appuyant sur le bouton "Droit" dans l'interface d'information, puis appuyer sur "OK" pour entrer dans l'interface de réglage des épaules. Vous pouvez aussi ajuster la position des épaules en utilisant les touches "HAUT" ou "BAS".

| Bouton                                                                            | Description                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Déplacement des rouleaux vers le haut |
|  | Déplacement des rouleaux vers le bas  |

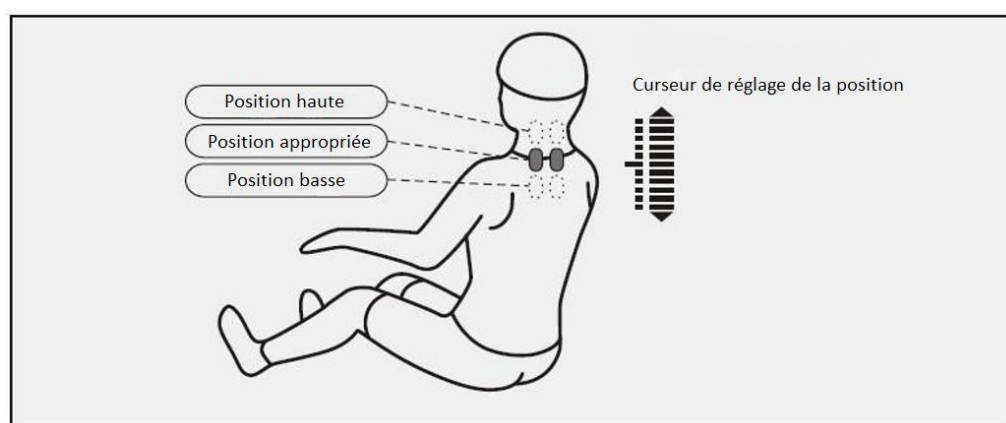

- Si vous devez ajuster la position des épaules après le démarrage du programme de massage, vous pouvez vous appuyer sur les touches (11) "HAUT" ou "BAS" de la télécommande pour ajuster la hauteur de la position des épaules.
- **Remarque : vous ne pouvez pas ajuster la position du massage lorsqu'il est en mode automatique**
- Après avoir entré le programme de massage, si vous avez besoin d'ajuster la position du massage, vous pouvez appuyer sur les boutons d'ajustement en partie basse de la télécommande pour sélectionner "Fonction manuelle".

**Bouton de pause**

Pendant que la fonction de massage est en service, appuyez sur le bouton "Pause" pour arrêter temporairement toutes les fonctions de massage ; appuyez à nouveau sur le bouton "Pause" pour reprendre la fonction de massage avant la pause. Si le temps de pause dépasse 20 minutes, toutes les fonctions de massage seront automatiquement désactivées.

## Massage automatique

| Bouton                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                              | Affichage |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Massage confort</b><br><i>Confort</i>                         | Massage doux et confortable pour détendre votre corps. Un massage en profondeur pour soulager la fatigue corporelle et apporter une relaxation totale.                                                                                   | F1 Auto   |
| <b>Massage relaxant</b><br><i>Relax</i>                          | Soulagez les tensions et détendez-vous profondément.                                                                                                                                                                                     | F2 Auto   |
| <b>Massage étirement</b><br><i>Stretch</i>                       | Un massage profond qui étire vos jambes et votre taille à travers le repose-pied et le dossier, permettant d'éliminer efficacement la fatigue, soulager les douleurs articulaires et restaurer la vitalité.                              | F3 Auto   |
| <b>Massage du cou et des épaules</b><br><i>Neck and shoulder</i> | Soulagez la douleur du cou et des épaules. Utilisez une technique de massage unique pour traiter la colonne cervicale et les omoplates, soulager la douleur du cou et des épaules, et améliorer la circulation sanguine vers le cerveau. | F4 Auto   |
| <b>Massage du dos et de la taille</b><br><i>Back and waist</i>   | Soulagez les douleurs du dos et de la taille. Un massage ciblé sur le dos et la taille pour soulager la douleur et détendre ces zones stressées et fatiguées.                                                                            | F5 Auto   |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Massage complet du corps</b><br><i>More</i>    | <p>Massage complet pour tout le corps. Un massage global qui se concentre sur le dos et la taille pour soulager la douleur dans ces zones, tout en offrant un massage par airbags pour une relaxation totale et un soulagement en profondeur de la fatigue et des douleurs.</p> | <b>A1 Auto</b> |
| <b>Rafrachissement cérébrale</b><br><i>More</i>   | <p>Détendez-vous et revitalisez votre esprit. Ce programme cible les points YUZHEN et DAZHU pour soulager les douleurs au cou et aux épaules tout en favorisant la circulation sanguine vers le cerveau.</p>                                                                    | <b>A2 Auto</b> |
| <b>Récupération sportive</b><br><i>More</i>       | <p>Récupérez rapidement après l'exercice. Soulage la douleur et la fatigue musculaire après une activité physique intense, aidant le corps à récupérer plus rapidement.</p>                                                                                                     | <b>A3 Auto</b> |
| <b>Rajeunissement</b><br><i>More</i>              | <p>Améliorez la qualité de votre sieste et de votre efficacité au travail. Ce programme améliore la récupération rapide et vous aide à retrouver de l'énergie, en augmentant l'efficacité au travail et en réduisant la fatigue.</p>                                            | <b>A4 Auto</b> |
| <b>Routine de bureau</b><br><i>More</i>           | <p>Contre les effets de la sédentarité au bureau. Ce programme améliore les fonctions corporelles en stimulant l'exercice physique par massage, idéal pour ceux qui passent de longues heures assis.</p>                                                                        | <b>A5 Auto</b> |
| <b>Bonne nuit</b><br><i>More</i>                  | <p>Préparez votre corps pour une bonne nuit de sommeil. À travers le massage des douze principaux points d'acupuncture, ce programme aide à rétablir l'équilibre du corps et à améliorer rapidement la qualité du sommeil.</p>                                                  | <b>A6 Auto</b> |
| <b>Massage complet par airbags</b><br><i>More</i> | <p>Massage complet par airbags pour une relaxation totale. Un massage par airbags pour détendre tout le corps en profondeur, éliminer la fatigue et soulager les tensions corporelles.</p>                                                                                      | <b>A7 Auto</b> |

Note : Les fonctions automatiques déjà sélectionnées en cours de service seront affichées sur l'écran de la télécommande.



## Massage manuel

### Menu Fonction Manuelle

- **11 techniques/fonctions de massage manuel** : OFF, Shiatsu, pétrissage, Tapotement, Pétrissage et tapotement simultané, Percussion.

| Fonction   | Bouton | Paramètre ajustable                | Affichage                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Techniques | MODE   | Shiatsu : vitesse, largeur         |    |
|            |        | Pétrissage : vitesse               |    |
|            |        | Tapotement : vitesse, largeur      |    |
|            |        | Pétrissage et tapotement : vitesse |    |
|            |        | Percussion : vitesse, largeur      |   |
| Rapidité   | SPEED  | 5 niveaux                          |  |
| Largeur    | WIDTH  | 3 positions en largeur             |  |

- Massage du dos
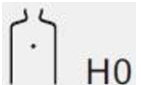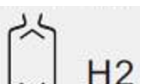
| Bouton                                                                              | Description                                                          | Affichage                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Massage ponctuel en position fixe                                    |  |
|                                                                                     | Massage local dans une zone spécifique (haut et bas : ~20cm)         |  |
|                                                                                     | Massage complet du haut du corps (haut et bas : longueur du rail SL) |  |
|  | Réglage de la position des bras articulés de massage                 | Monter                                                                                |
|  |                                                                      | Descendre                                                                             |

- Massage par pression d'air

| Fonction       | Bouton              | Description                        | Affichage                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression d'air | <b>AIR PRESSURE</b> | Massage sur les bras et les jambes | Arm <br>Feet  |
|                |                     | Massage sur les bras               | Arm                                                                                              |
|                |                     | Massage sur les jambes             | Feet                                                                                             |
| Force          | <b>INTENSITY</b>    | Il peut être ajusté sur 3 niveaux  | Arm <br>Feet  |

- Autres fonctions manuelles

| Fonction          | Bouton             | Description                                                                                                         | Affichage                                                                             |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Chauffage du dos  | <b>HEATING</b>     | Activez ou désactivez la fonction de chauffage du dos ; le dos deviendra plus chaud après un chauffage de 3 minutes |  |
| Massage des pieds | <b>FOOT ROLLER</b> | Massage des pieds (doux, moyen ou fort), appuyez à nouveau pour éteindre                                            |  |
| Pause / Démarrer  | <b>PAUSE</b>       | Vous pouvez arrêter et suspendre le massage par appui sur le bouton, appuyez à nouveau pour redémarrer.             |  |


- Réglage du dossier et du repose-pieds

| Fonction                | Bouton                                                                              | Description                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assise                  |    | Lorsque vous appuyez sur le bouton, le dossier se lève et le repose-pieds s'abaisse. Sur un nouvel appui, le mouvement s'arrête. |
| Allongée                |    | Lorsque vous appuyez sur le bouton, le dossier s'abaisse et le repose-pieds se lève. Sur un nouvel appui, le mouvement s'arrête. |
| Monter le repose-pieds  |    | Lorsque vous appuyez sur le bouton, le repose-pieds se lève.                                                                     |
| Abaissér le repose-pied |  | Lorsque vous appuyez sur le bouton, le repose-pieds se baisse.                                                                   |
| Zero Gravité            |  | La fonction démarre en appuyant sur le bouton et vous pouvez choisir parmi 3 inclinaisons différentes.                           |

- Réglage du timer

| Bouton                                                                              | Description                                                                                                                                                                                     | Affichage    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 1 pression sur le bouton permet d'ajouter 5 minutes au temps de massage. Le temps maximum possible est de 30 minutes. A l'issu, 5 minutes seront déduites du temps de massage sur chaque appui. | <i>20min</i> |

- Touches de raccourci, USB et étui pour téléphone

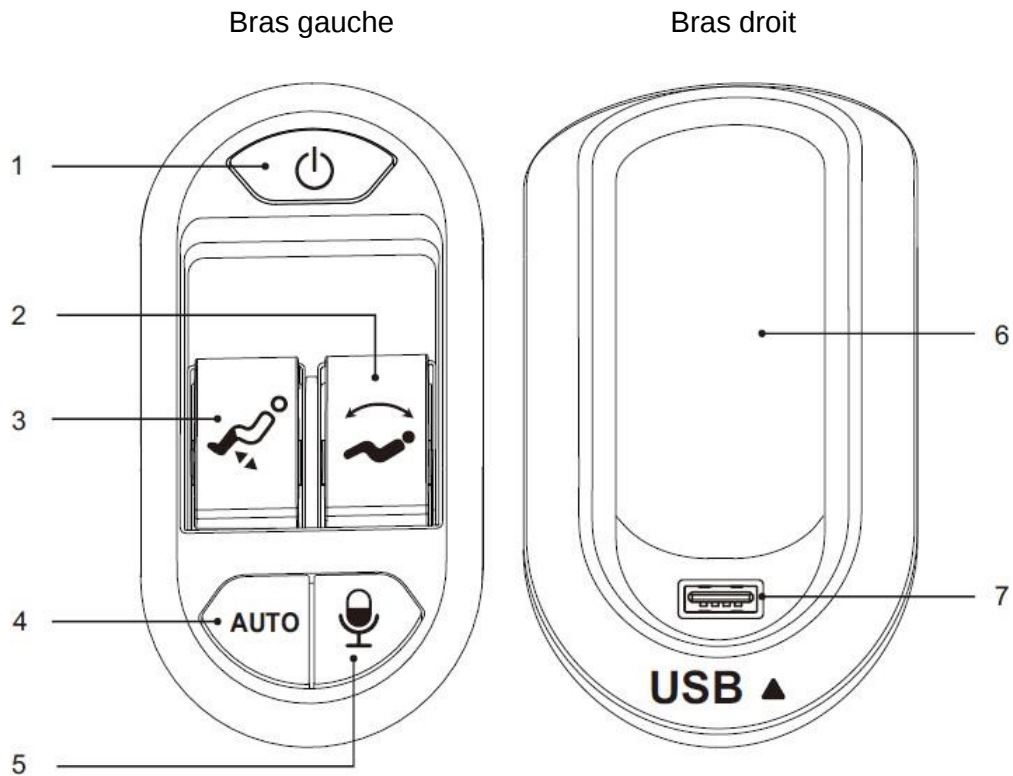

Raccourcis clavier de l'accoudoir gauche :

1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de déplacement du dossier (haut-bas)
3. Bouton de déplacement du repose-pieds (haut-bas)
4. Démarrage des modes de massage automatiques
5. Commande vocale
6. Étui pour téléphone/télécommande
7. Connecteur USB

- Configuration de la commande vocale (en anglais)

1. Appuyez sur le bouton de commande vocale (ou dites "Hi Alice !")
2. Il répondra : "I'm here".
3. Il faut en moyenne 6 secondes pour que le fauteuil traite les instructions qui lui sont apportées par oral. A l'issu, répétez (vous pouvez également appuyer à nouveau sur le bouton).

| Instructions vocales       | Réponses vocales                     |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Massage on                 | Answer: Ok, massage on.              |
| Massage close              | Answer: Ok, massage close            |
| Comfort Massage.           | Answer: ok, comfort massage          |
| Relax massage.             | Answer: ok, relax massage            |
| Full body massage.         | Answer: ok,full body massage         |
| Neck and shoulder massage. | Answer: ok,Neck and shoulder massage |
| Back and waist massage.    | Answer: Ok,back and waist massage    |
| Stretch massage.           | Answer: ok,stretch massage           |
| Fixed massage.             | Answer: ok,fixed massage             |
| Change the other mode.     | Answer: Ok, change the other mode    |
| Go little down.            | Answer: Ok, go little down           |
| Go little up.              | Answer: Ok, go little up             |
| Open the air pressure.     | Answer: OK, Open the air pressure    |
| Close the air pressure.    | Answer: OK , Close the air pressure  |
| Up the seat position.      | Answer: Ok, Up the seat position     |
| Down the seat position.    | Answer: Ok, Down the seat position   |
| Stop adjustment.           | Answer: Ok, stop adjustment          |

- **Arrêter le massage**


- Pendant le massage, vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le fauteuil reviendra alors à sa position d'origine. Mettez le fauteuil hors tension à l'aide de l'interrupteur principal, puis débranchez la fiche de la prise.

- **Système de lecteur de musique Bluetooth**

1. Sur votre appareil intelligent (téléphone, tablette, ...), allumez la fonction "Bluetooth" dans les paramètres. Il recherchera et reconnaîtra automatiquement les nouveaux appareils Bluetooth.
2. Connectez-vous à l'unité Bluetooth du fauteuil de massage.
3. Ouvrez votre lecteur de musique et sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter.

- **Démontage et utilisation des coussins de tête et du coussin de dossier**

- Les coussins sur le dossier rendent le massage par les rouleaux plus doux.
- La partie coussin du dossier est reliée au fauteuil par une fermeture éclair située en haut du dossier, et le coussin de tête est relié au coussin du dossier par du velcro.
- Si vous souhaitez un massage plus fort au niveau des épaules et du cou, déclipsez et/ou dézippez simplement les coussins.

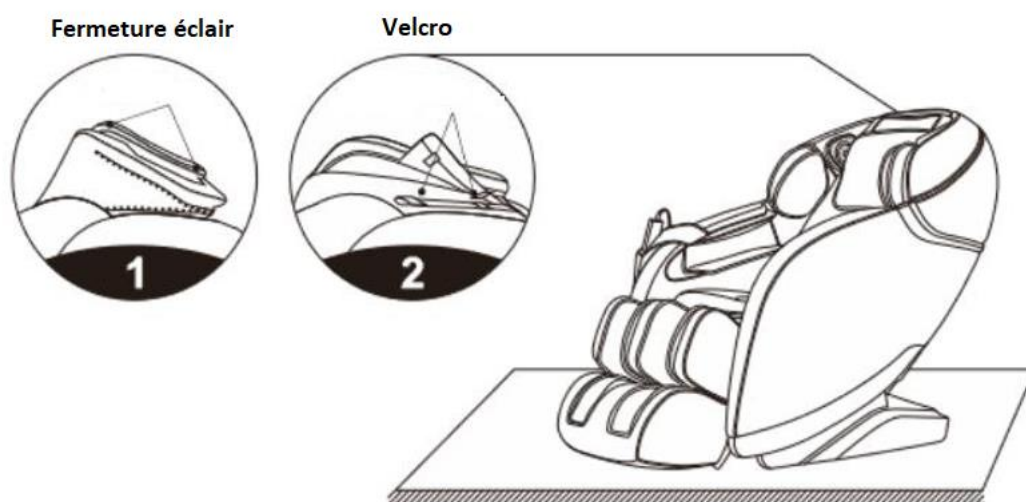


---

- **Protection du sol :**


La pression prolongée et lourde sur le fauteuil de massage peut causer des rayures sur le sol. Ainsi, placez un tapis ou un coussin sur le sol où le fauteuil de massage est situé pour éviter ce dommage.

Note : Ne déplacez pas le fauteuil de massage avec ses roues sur un sol rugueux ou dans un espace étroit. Au moins deux personnes sont nécessaires pour le soulever. Lors du levage, utilisez les plaques de scellement du repose-jambes et les rainures de couverture du dossier comme points d'appui. (Ne soulevez pas l'accoudoir directement.)

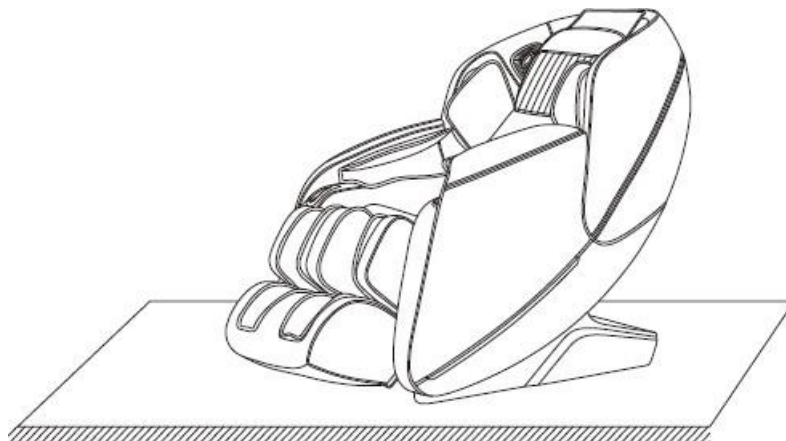

- **Instruction pour le déplacement :**

Lors du déplacement du fauteuil de massage, assurez-vous que tous les fils sont tirés de la surface du fauteuil de massage ; deux personnes doivent travailler ensemble pour déplacer le fauteuil de massage. Il devrait y avoir une personne respectivement devant et derrière le fauteuil de massage. La personne devant le fauteuil de massage devrait le soulever, tandis que la personne derrière devrait le pousser vers le bas. Lorsque le centre de gravité du fauteuil de massage est complètement sur les roues de la base, vous pouvez pousser le fauteuil de massage vers l'avant jusqu'à une position appropriée, puis le restaurer doucement à l'angle normal. (Remarque : pendant le déplacement, vous devez d'abord éteindre l'interrupteur d'alimentation, puis débrancher le cordon d'alimentation et le fil de connexion de la télécommande.)

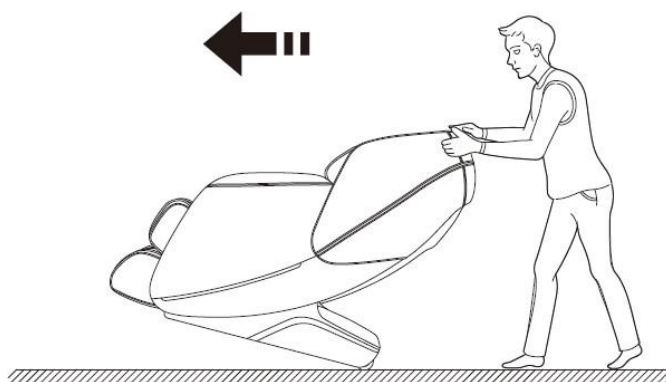

**Avertissement :** Les roues arrière mobiles du fauteuil de massage sont uniquement adaptées aux déplacements de courte distance et à une vitesse réduite. Pour les déplacements de longue distance, veuillez utiliser d'autres outils de déplacement auxiliaires pour déplacer ce

fauteuil de massage !

- **Distance par rapport au mur**

Veuillez respecter une distance de 5 cm entre le dossier du fauteuil et le mur. si le dossier est trop près du mur, le fauteuil heurtera le mur lorsqu'il sera abaissé, ce qui endommagera le produit.

## Caractéristiques

- Modèle: OUESSANT
- Alimentation 110-120V~ 60Hz
- 220-240V~ 50Hz/60Hz
- Puissance (en fonctionnement): 120W
- Durée du massage de base: 20 minutes
- Structure de sécurité : Classe I
- Matériaux utilisés : PVC, PA, acier et composants électroniques

## Garantie

Votre fauteuil de massage OUESSANT est couvert par une garantie d'une durée de 36 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les problèmes liés à une utilisation normale du produit. Veuillez conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service après-vente.



Marquage réglementaire, attestant que le produit est conforme aux normes et exigences fixées par la réglementation européenne en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Ce symbole indique qu'il est strictement interdit de jeter votre produit électrique usagé.  
Merci de respecter l'environnement en utilisant les zones désignées pour la collecte des déchets.

© 2022 Distegn

# Distegn